バージョン 3.x.x.x から 4.x.x.x にバージョンアップする場合

注意

4.x.x.x で新しく収録したデータは、3.x.x.x のソフトウェアでは開くことが出来なくなります。

①Neuro-MEP.NETomega-4.1.7.7-Setup.exe を起動します。

②OK をクリックします。



③Next をクリックします。

その後インストールが開始されます。



④Next をクリックします。



⑤Finish をクリックします。



⑥Neuro-MEP.NETomega を起動します。 (3.x.x.x とアイコンが変わります)



 ⑦Leave current settings にチェックを付けた 状態で OK をクリックします。
 (これ以外の項目にチェックを付けると 以前の設定がリセットされます。)

NI	Settings upgrade X
Ν	Program has been upgraded from version 3.7.3.8 to version 4.1.7.7
MG.	Select action for settings of user Guest
	<ul> <li>Update all settings (all your changes will be lost)</li> </ul>
	O Leave current settings
	✓ More
	Update norm system
	(all your changes will be lost)
	OK.
	OK

⑧USA にチェックを付けた状態で OK を クリックします。(言語の選択)

Region of use				>
Select software region of use				
O Russia and CIS countries				
O Europe				
USA				
O Other region				
Select the region in which this software practice by the regulator of this region. this window.	will be used. You will only be Remember that you are fully	able to use those functions legally responsible for the i	that are approved for use in eliability of the information sp	medical pecified in
			OK	Cancel
			UK	Cancer

⑨任意の空のフォルダを用意し、データベースを作成します。

- (1)New folder をクリックします。
- (2)任意の名前(半角英数字)を入力し OK をクリックします。

(3)そのまま(作成したフォルダが選択された状態)OK をクリックします

🔼 Create a ne	w database	×
Database type	File database	•
- Folder selection	on	
Path: C:¥		New folder
V	Vindows (C:)	^
>	ユーザー	
>-	CardbaseMdb	
>	, inetpub	
>	Intel	
	NSDatabase	
	PerfLogs	
> -	Program Files	
> -	Program Files (x86)	
>	Windows	
	Windows10Upgrade	*
Select of the	ale emply folder for database	
Database file	encryption	
Enter encryp	tion key	
✓ Back up		
Backup C:¥		
Make bac	kup copy every day	
Make rep	eated copy every 7 🖨 days	
<ul> <li>✓ Authorization</li> </ul>	on	
		OK Cancel

💹 Create a new	database		×
Database type	File database		•
Folder selection	1		
Path: C#New	folder		New folder
🗸 🖕 Wi	ndows (C)		^
5-	BUFFALO		
5-6	CardbaseMdb		
	CardbaseMdb02		
5-	CardbaseMdbDemo		
	DRIVERS		
5-	folder		
	Mitsar		
5-	National Instruments Downloads		
	New folder		
J 3-	NSTIMCTLDEMO		~
Database file e	ncryption		
Enter encrypti			
Back up			
Backup C/WNe	w folder		-
Make back	ip copy every day		
Make repea	ited copy every 7 a days		
<ul> <li>Authorization</li> </ul>	1		
		~	Court
		OK	Cancel

⑪yes をクリックします。

⑫convert をクリックします。

(旧バージョンで収録したデータを取り込みます)



③OK をクリックします。
 ④Exit をクリックします。

Source	
C:¥CardbaseMdb <mdb></mdb>	Select
Destination	
C¥CardbaseMdb2	Select
Data for converting	
Exam filter:	Creation date:
↓         ↓	Data conversion is completed Converting objects 37 of 37; slipped: 0.     OK

⑤完了です。

スタート画面の Exams の最近の履歴は残りません。

Open exam manager…から過去のデータを検索します。

Neuro-MERNET		-	۵	×
Exam Report Test View Setup ?				
🚹 🖏 🦊 🐂 💞 🥵 🔒 🧟 🔁				
1 54 F7 10 10 10				
🖗 Start page			Ŧ	×
Neurooft Neuro-MEP.NET				am inspector
Actions:	Exams:			
New exam F2	Latest exams list is empty			
ٷ Open exam manager F3				
Change settings				
Customize tests templates				
Exit Alt+X				

## アップデート後、データの移行が出来なかった場合・やり直す場合

(⑨で空フォルダを作成していない場合→先に6ページ)

Exam manager を開きます。

🐱 Neuro-MERNET								
Exam Report Test View Setup ?								
🚹 💫 🦊 🖌 🖋 🦉 🔒	<b>R</b> 1	1						
My SY FY 00 00 00 .								
🖗 Start page								
Actions:								
New exam	F2							
Open exam manager F3								
Change settings		-						

Exam export の import from old format database を選択します。

L	Exam manager																	-
999	Folder files	•	(S) Up	Folde	p er file	Jatient.	Exam	Delete	Databases		Сору	Paste	Cut	Exam ii	nport	Exam export	O Search	-
	Name				Туре		Creation date						Patie	rt I	mport fre	om file		
	а				Course		2019/05/30		1	a	🔋 Exam info	Clinical	info 📋 C	۱ م	mport fr	om old format data	oase	2 at
	大久保				EP		2019/05/30			17	e) eu							_

Source の select から「MDB database」を選択し、C: にある CardbaseMdb を選択し、OK を押します。

Source	_		×	18:30:29)	
Old format database		Selec	t 🔻		
Destination			MDB database		
C:¥CardbaseMdb02			Microsoft SQL-server		
Data for converting		MySQL-server			
Exam filter:	Creation date:		Archiv	/e nsarc	
	from YYYY / MM / DD 15 to YYYY / MM /	DD 1	5		

Folder selection — 🗌	×							
Select or create folder for a new database.								
Address: C:\CardbaseMdb								
VINDOWS (C:) VINDOWS (C:) VINDO	^							

Destination の Select から Open existing database を選択し、現在使用しているフォルダ を選択します。(初めから入力済み)

	Database converting		_		×	18:30:29)
	Source					
	C:¥CardbaseMdb <mdb></mdb>			Select	•	
I	Destination					)/05/30 18:30:28' created
I	C:¥CardbaseMdb02			Select	•	
	Data for converting		Open	existing database		
l	Exam filter:	Creation date:			Create	e new database
I			C:¥Car	rdbaseMdb02		

## convert を押します。

No. Database converting							-		×
Source									
C:¥CardbaseMdb <mdb></mdb>								S	elect 🔹
Destination									
C:¥CardbaseMdb02								S	elect 💌
Data for converting									
Exam filter:	Creat	ion date	8						
	from	YYYY	/ MM	/ DD	15	to YYYY	/ MM	/ DD	15
▲ 🗹 😓 All objects									<u>_</u>
🔺 🗹 💷 kuriyama									
🗹 💐 kuriyama 28 years (17.04.2017)									
🗹 💐 kuriyama 28 years (21.04.2017)									
kuriyama 28 years (24.04.2017)									
kuriyama 28 years (28.04.2017)									
kuriyama 28 years (22.05.2017)									
kuriyama 28 years (24.05.2017)									
kuriyama 28 years (02.06.2017)									
kuriyama 28 years (27.06.2017)									
4 🗸 📑 aa									
✓ 🗎 aa - (22.05.2017)									
✓ aa - (09.06.2017)									
V aa - (14.07.2017)									
🗹 📮 aa - (22.08.2017)									-
							C	onvert	Exit

新しくデータベースを作成する場合。(アップデートした際にデータベース移行できなかった場合)

Database アイコンをクリックし、Database list ウインドウの「New」をクリックします。



データベースを保存したい空のフォルダを選択し、OK を押します。

😢 Create a new database 🛛 🕹 🗙			
Database type	File database		•
Folder selection			
Path: C:¥New folder			New folder
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Vindows (C:) BUFFALO CardbaseMdb CardbaseMdb02 CardbaseMdbDemo DRIVERS folder Mitsar National Instruments Downloads		^
			~
Database file encryption			
Enter encryption key			
✓ Back up			
Backup C:¥New folder			
Make backup copy every day			
Make repeated copy every 7 adays			
<ul> <li>Authorization</li> </ul>			
		OK	Cancel